

Anzeige von radiologischen Bildern auf Patienten-CD

Spital Bülach



SEKRETARIAT RADIOLOGIE:
TEL. 044 863 23 82
FAX 044 863 23 27
E-MAIL: RADIOLOGIE@SPITALBUELACH.CH

ÄRZTE RADIOLOGIE:
DR. STEFAN BÖLTER
DR. MIKE FITZE
DR. TOMAS FRYSCAK
CHEFARZT
LEITENDER ARZT
LEITENDER ARZT

Digitale Bilder in der Radiologie unterliegen einem internationalen Standard, dem sogenannten DICOM-Format. Um die Bilder korrekt darzustellen, ist ein sogenannter DICOM-Viewer (Ansichtsprogramm) nötig, welcher auf dieser CD integriert ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Bilder zu betrachten:

1. Legen Sie die CD in ihr CD-Laufwerk.
Der Startbildschirm wird angezeigt.



Hinweis: Wenn die CD nicht automatisch startet, gehen Sie wie folgt vor:

- a. Öffnen Sie die Dateiansicht des CD-Laufwerks.
- b. Starten Sie das Programm LaunchPad.exe.

2. Wählen Sie den entsprechenden Viewer unter „Select DICOM Viewer“, falls dieser nicht automatisch startet.

Hinweise für die Auswahl des Viewers:

CT und MRI-Bilder lassen sich am besten über den E-Filme lite Viewer aufrufen.

3. Klicken Sie auf „DICOM Studies“, um den ausgewählten Viewer zu starten.
4. Öffnen Sie die gewünschte DICOM-Studie zum Betrachten der einzelnen Aufnahmen.

Hinweis: Die beiden Viewer bieten verschiedene Werkzeuge zum Betrachten und Bearbeiten der Bilder.